

Zahnimplantate

und wie diese Ihnen helfen können



A company in the
AstraZeneca Group

ASTRA
ASTRATECH



Das Astra Tech Zahnimplantat System bietet Ihnen eine sichere und zuverlässige Methode für den Zahnersatz, gleichgültig, ob Sie einen oder mehrere Zähne verloren haben.




Ihre neuen Zähne werden aussehen wie Ihre natürlichen Zähne und sich auch so anfühlen. Ihre neugewonnene Lebensqualität wird Ihnen Grund zum Lächeln geben und Sie werden mit neuem Selbstvertrauen Ihr Leben genießen können.

Welche Erfahrungen haben Patienten mit Zahnimplantaten?



“Da mein Berufswunsch Krankenschwester ist, ist es für mich ein großer Gewinn, meinen Patienten ein Lächeln zu schenken, ohne mich dabei schämen zu müssen.”

Welche Erfahrungen haben Patienten mit Zahnimplantaten?

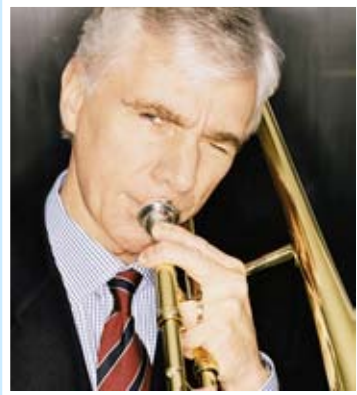


“Ich habe sogar wieder angefangen Trompete zu spielen.”



“Das Essen ist kein Problem mehr.”

Welche Erfahrungen haben Patienten mit Zahnimplantaten?

“Heute kann ich beides, kauen, schmecken und die Dinge genießen, die ich esse.”

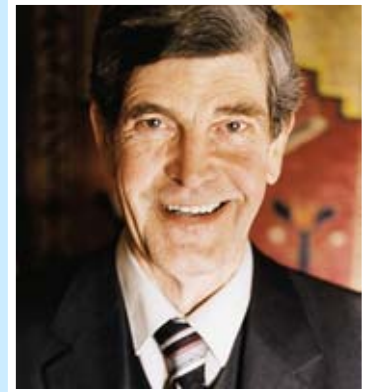


“Ich würde mich niemals mehr für eine Prothese entscheiden.”



Was ist ein Zahnimplantat?

- Es ist aus Titan und sieht aus wie eine Schraube.
- Im Knochen verankert dient es als sichere Wurzel für Ihren neuen Zahn.
- Es kann für verschiedene Indikationen, wie Kronen, Brücken oder Prothesen genutzt werden.


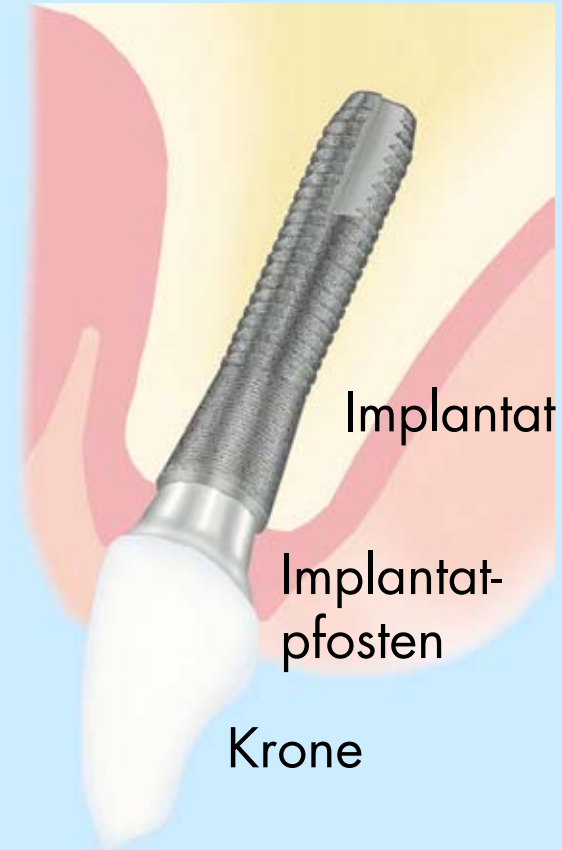


Wann ist ein Zahnimplantat eine gute Alternative?





Ganz gleich ob Sie einen, mehrere oder alle Zähne verloren haben - Zahnimplantate sind ein dauerhafter Weg um neue Zähne zu bekommen.

Bei Verlust eines Zahnes...

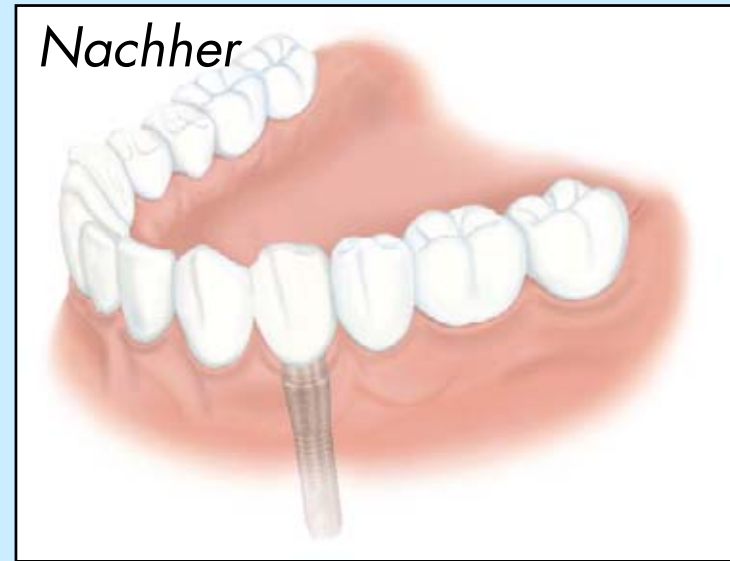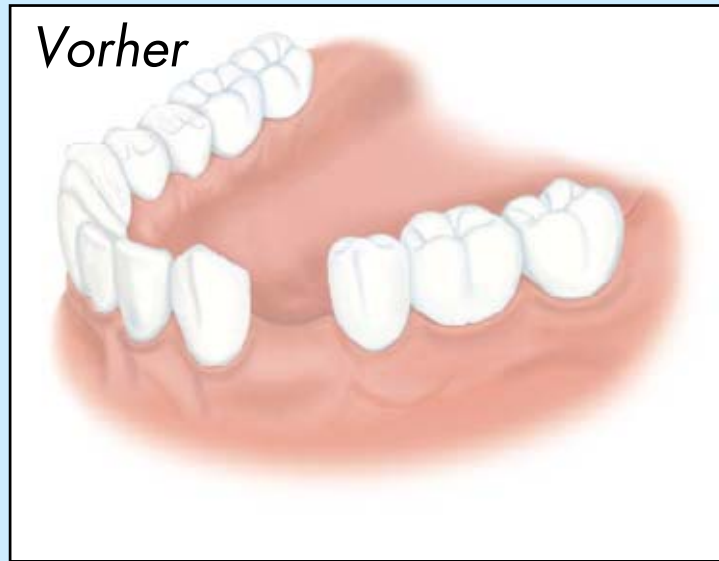



Eine Einzelkrone als Aufbau auf dem Implantat wird Ihre Kaufunktion und Ihr natürliches Aussehen wieder herstellen.

Bei Verlust mehrerer Zähne...

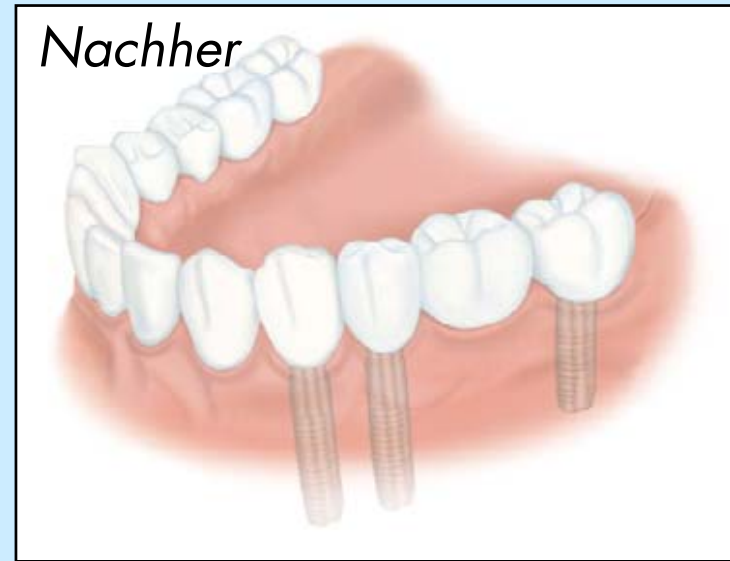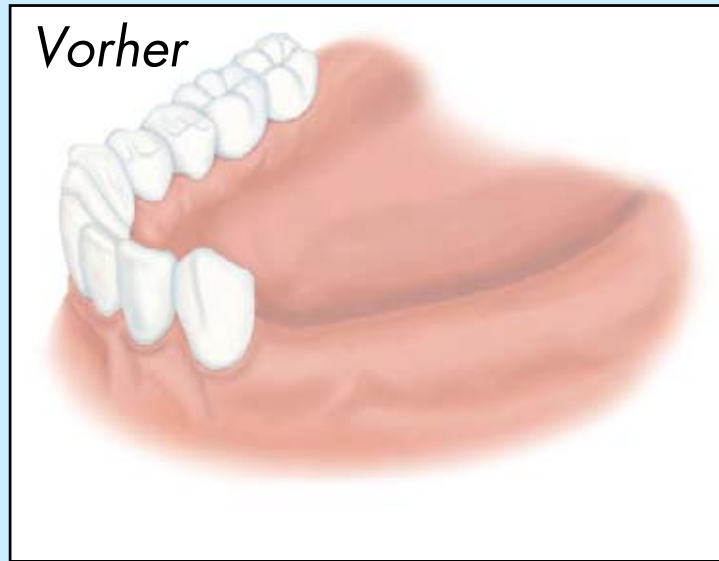



Eine Brücke oder aber Kronen, getragen auf mehreren Implantaten, sind eine gute Alternative um die Funktion und das Aussehen wiederherzustellen.

Bei Verlust aller Zähne...

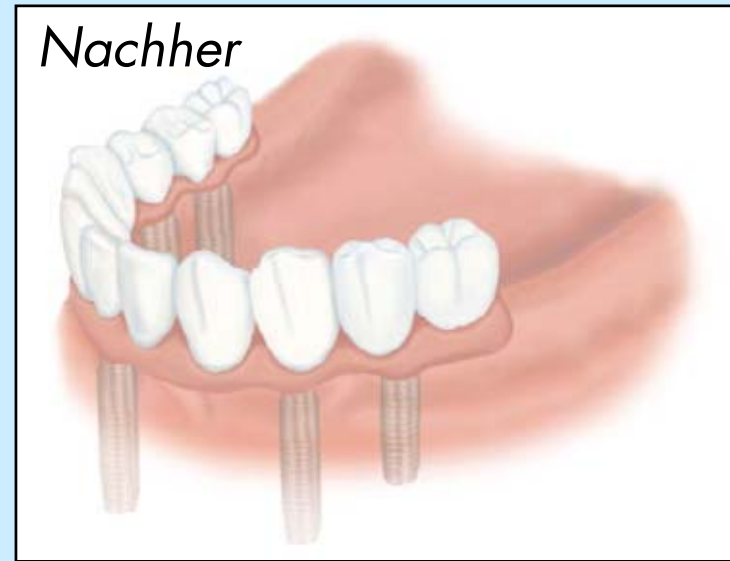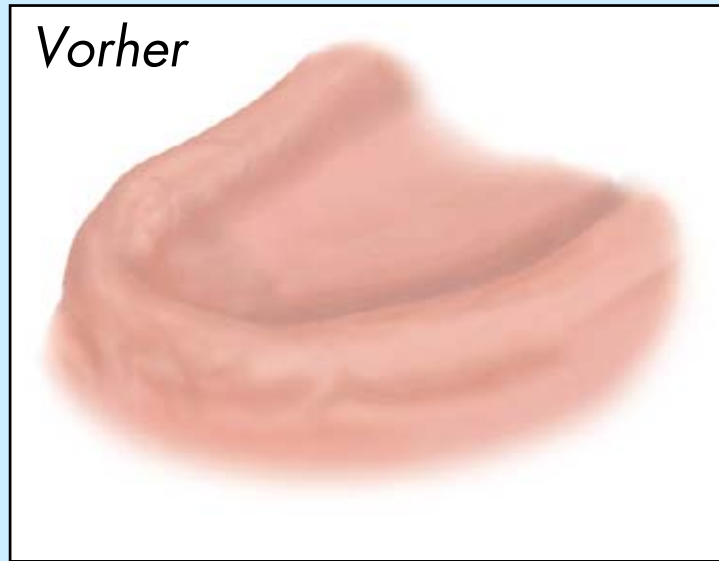

Eine festsitzende Brücke wird mit mindestens 5 Implantaten verbunden.

Bei Verlust aller Zähne ...

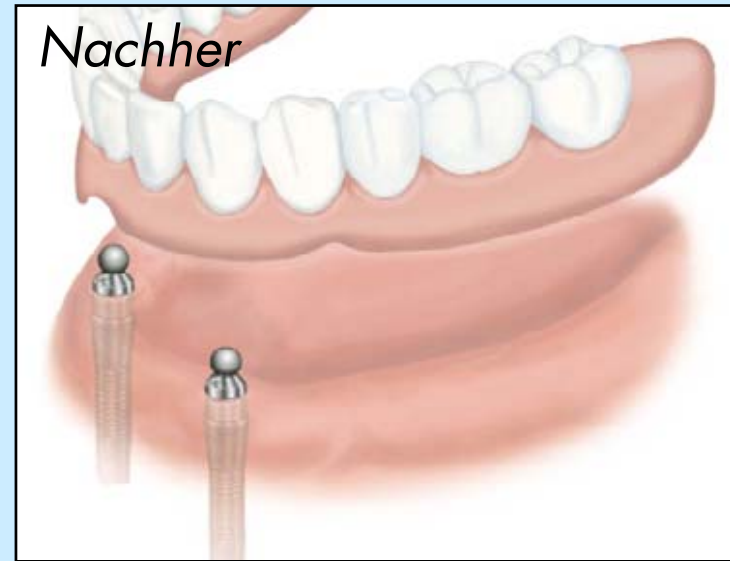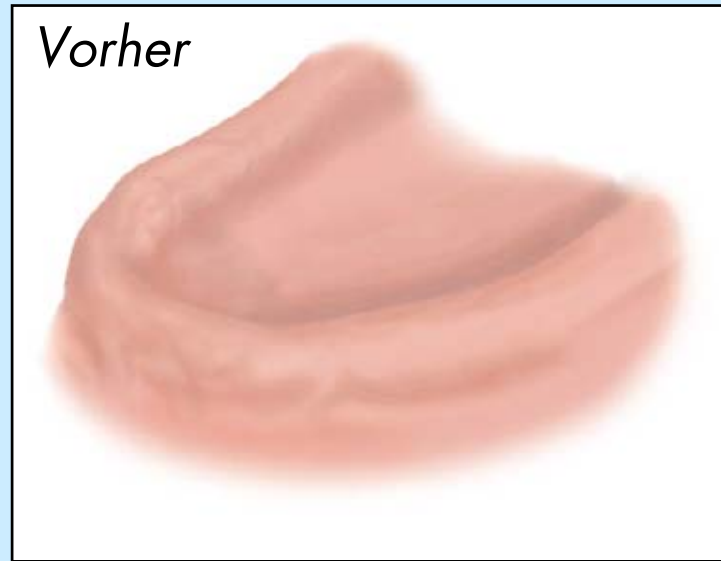

Eine implantatunterstützte Prothese ist über verschiedene Verbindungsmöglichkeiten mit mindestens 2 Implantaten verbunden.

Wann ist ein Zahnimplantat eine gute Alternative?



Brücke mit zwei abgeschliffenen Zähnen zur Befestigung.



Teilprothese, die mittels der benachbarten Zähne getragen wird.

Wie unterscheiden sich implantatgetragene Zähne von einer herkömmlichen Prothese?

- funktionieren, sehen aus und fühlen sich an wie eigene Zähne
- erlauben Ihnen vertrauensvoll zu lachen, zu sprechen und zu essen
- sind komfortabel und beständig
- erfordern kein Abschleifen oder Präparieren der Nachbarzähne




Welches Ergebnis kann ich erwarten?



- Fast unmöglich einen Unterschied zu sehen.
- Astra Tech Zahnimplantate können bei guter Pflege ein Leben lang halten.
- Sie können essen was Sie wollen - es besteht kein Unterschied zu natürlichen Zähnen.

Warum sollte ich nach Astra Tech Zahnimplantaten fragen?

- Natürliche ästhetische Ergebnisse
- Konstruiert auf biologischen und biomechanischen Grundlagen
- Herausragende Langzeiterfolge in klinischer Forschung
- Minimal benötigte Instandhaltung

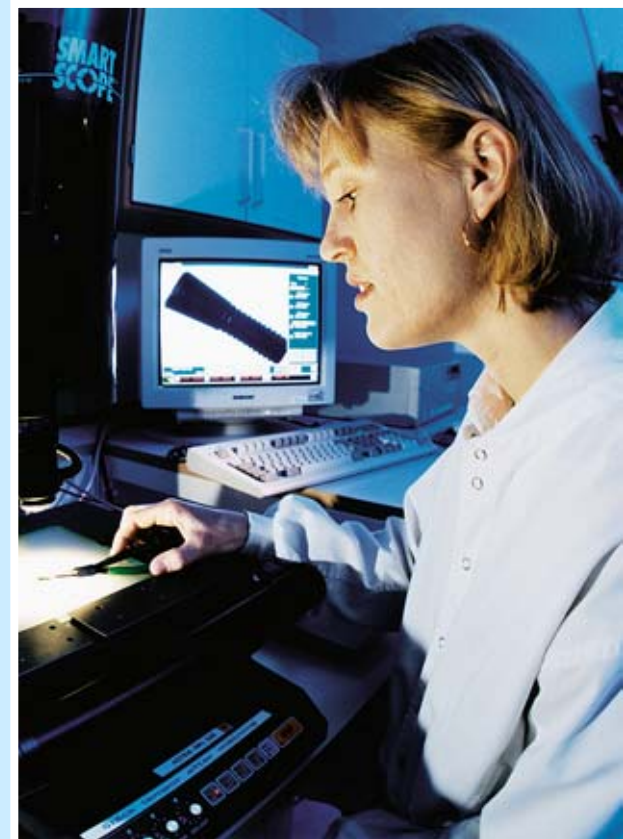

Die einzelnen Behandlungsschritte




Einzeitige Behandlung



Zweizeitige Behandlung


Die einzelnen Behandlungsschritte

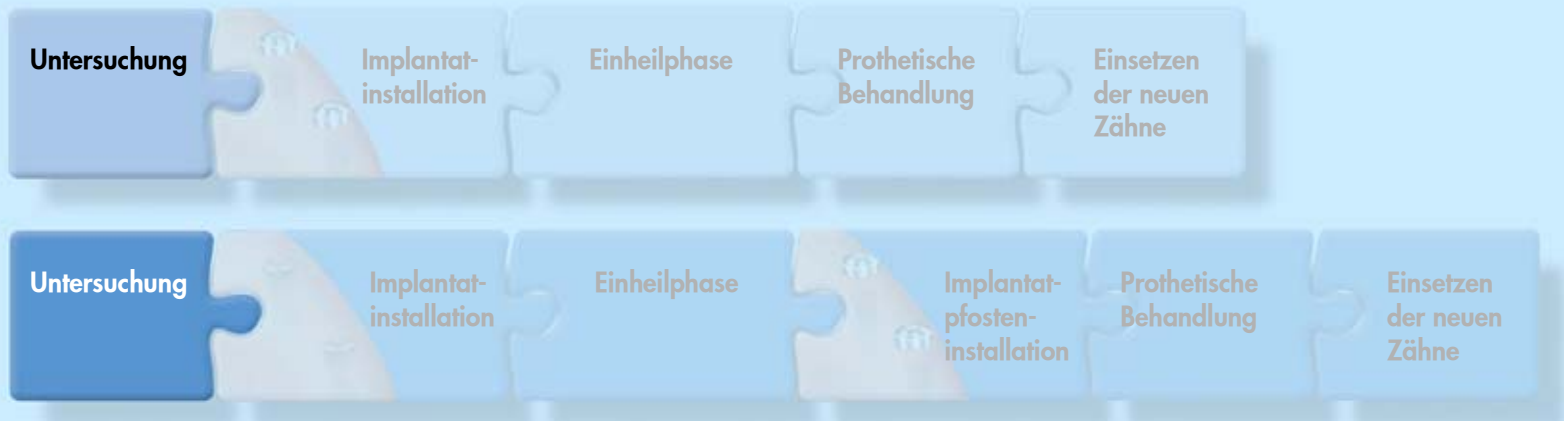

Untersuchung

- Ihr Zahnarzt untersucht Ihre Zähne, Ihr Zahnfleisch und Ihren Kieferknochen.
- Röntgenaufnahmen werden angefertigt zur Beurteilung des Knochenangebotes.
- Ihr allgemeiner Gesundheitszustand wird in die Untersuchung mit einbezogen.

Die einzelnen Behandlungsschritte

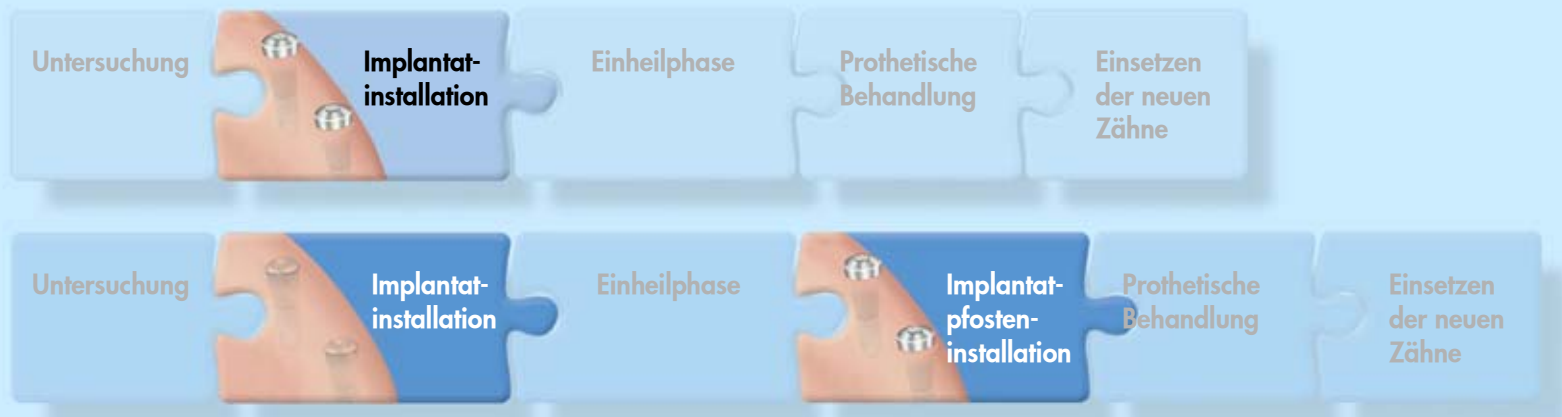

Implantat- und Implantatpfosteninstallation

- *Einzeitige Behandlung*—Implantate und Implantatpfosten werden zur gleichen Zeit eingesetzt und sind nach der Operation direkt im Mund sichtbar.
- *Zweizeitige Behandlung*—Die Implantate werden unter dem Zahnfleisch "ruhen" gelassen. Die Implantatpfosten werden in einer zweiten kleinen Operation eingesetzt.

Die einzelnen Behandlungsschritte



Einheilphase

- Die Einheilphase beträgt 3-6 Monate, unter Umständen auch kürzer, abhängig von der Knochenqualität und Implantatposition.
- Die fehlenden Zähne werden für diese Zeit mit einem Provisorium ersetzt.

Die einzelnen Behandlungsschritte



Prothetische Behandlung

- Es werden Abdrücke genommen um ein Modell Ihres Kiefers herzustellen.
- Es wird eine Krone, Brücke oder Prothese angefertigt, die Ihren natürlichen Zähnen in Farbe und Form angepasst wird.

Die einzelnen Behandlungsschritte



Das Einsetzen Ihrer neuen Zähne...

Sie besitzen nun neue Zähne, die sich so anfühlen und auch so aussehen wie Ihre natürlichen Zähne!

Fragen & Antworten

- *Ist der Eingriff schmerzhaft?*



Eine lokale Betäubung verhindert Schmerzen während des operativen Eingriffs. In den meisten Fällen reichen übliche Schmerzmittel danach aus.

Fragen & Antworten

- *Wie hoch sind die Kosten?*



Der Umfang der Behandlung bestimmt die Kosten, es werden jedoch langfristig keine neuen Kosten entstehen. (Fragen Sie Ihren Zahnarzt!)

Fragen & Antworten

- *Werden sich meine neuen Zähne so anfühlen wie meine eigenen?*



Ja, sie funktionieren wie Ihre natürlichen Zähne, wenn Sie kauen, sprechen oder lachen. Die meisten Patienten spüren keinerlei Unterschied.

Fragen & Antworten

- *Werden meine neuen Zähne so aussehen wie meine eigenen?*



Ja, normalerweise kann nur das geschulte Auge eines Zahnarztes einen Unterschied erkennen.

Fragen & Antworten

- *Kann ich meine anderen Zähne behalten?*



Ja, mit dem Astra Tech Zahnimplantat System müssen Sie keine gesunden Zähne opfern, um die Fehlenden zu restaurieren.

Fragen & Antworten

- *Spielt mein Alter eine Rolle?*



Nein, Ihre Gesundheit ist entscheidend. Wenn Sie unter 18 sind, muss sichergestellt sein, dass das Knochenwachstum abgeschlossen ist.

Fragen & Antworten

- *Wie sicher sind Zahnimplantate?*



Das Astra Tech
Zahnimplantat System
zeigte in weltweiten
klinischen Studien
hervorragende Ergebnisse
im Hinblick auf Aesthetik
und Voraussagbarkeit.

Fragen & Antworten

- *Warum bestehen die Schrauben aus Titan?*



Titan ist ein Metall, das von unserem Körper vollständig akzeptiert wird und das Knochengewebe kann sehr dicht an Titan heranwachsen, "Osseointegration".

Fragen & Antworten

- *Wie oft muss ich zum Zahnarzt, bis die Behandlung abgeschlossen ist?*



Das ist verschieden, in der Regel bedarf es jedoch 6-8 Sitzungen

Fragen & Antworten

- *Wird die Behandlung in Narkose durchgeführt?*



Normalerweise reicht ein normales Lokalanaesthetikum, in einigen Fällen in Kombination mit einem Beruhigungsmittel aus.

Fragen & Antworten

- *Muss ich während der Behandlungszeit ohne Zähne sein?*



Nein, es gibt immer eine Möglichkeit einer provisorischen Versorgung, es gibt jedoch Ausnahmen für Patienten mit frischen Knochentransplantaten.

Fragen & Antworten

- *Wie pflege ich meine neuen Zähne?*



Eine sorgfältige tägliche Zahnpflege ist das Wichtigste. Ihr Zahnarzt wird Sie hinsichtlich der richtigen Zahnpflege beraten.

Fragen & Antworten

- *Kann ich sofort wieder arbeiten gehen?*



Die meisten Patienten sind in der Lage am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen.

Fragen & Antworten

- *Muß ich das Rauchen einstellen?*



Es ist sehr empfehlenswert das Rauchen einzustellen. Rauchen stört den Heilungsprozess und kann die Langzeitprognose verringern.

Fragen & Antworten

- *Kann Kaffee, Tee oder Wein meinen Zähnen schaden oder diese verfärben?*



Nicht mehr als auch Ihren natürlichen Zähne.



Welche Vorteile bietet Ihnen ein Zahnimplantat?

- Astra Tech Zahnimplantate sind ein dauerhafter Weg um Ihre fehlenden Zähne zu ersetzen.
- Forschung und Dokumentation zeigen Langzeiterfolge.
- Sie können die Möglichkeit vertrauensvoll zu lachen, zu sprechen und zu essen wiedergewinnen.

Fragen Sie Ihren Zahnarzt, welche Vorteile Ihnen ein Zahnimplantat von Astra Tech bietet!

ASTRA TECH IMPLANTS

D E N T A L S Y S T E M